

COVID-19 SURFACE TESTING

Ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 σε επιφάνειες Οδηγίες δειγματοληψίας

Για τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε το **DNAlogy - Covid-19 kit**, το οποίο περιέχει αποστειρωμένους στειλεούς, φιαλίδια μεταφοράς με συντηρητικό υγρό*, σακουλάκι μεταφοράς βιολογικού υλικού, ένα ζευγάρι γάντια και το έντυπο παραγγελίας.

* το φιαλίδιο μεταφοράς με το συντηρητικό υγρό μπορεί να συντηρηθεί για 2 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου και μέχρι 6 μήνες στο ψυγείο.



Πριν ξεκινήσετε τις δειγματοληψίες, προσδιορίστε τα σημεία δειγματοληψίας επιλέγοντας σημεία μεγάλης χρήσης και επαφής: πόμολα, πόρτες, σκάλες, βρύσες, τουαλέτες, διακόπτες ηλεκτρικού, φίμτρα κλιματιστικού, κουμπιά ανελκυστήρα, χειρολαβές καρεκλών, πληκτρολόγια, τηλέφωνα, γραφεία, παιχνίδια κτλ.

Βήμα 1.

Ανοίξτε προσεκτικά την συσκευασία, αφαιρέστε το περιεχόμενο της και φορέστε τα γάντια.

Βήμα 2.

Βγάλτε το πρώτο φιαλίδιο μεταφοράς με το συντηρητικό υγρό από το σακουλάκι και ανοίξτε το καπάκι του. Ανοίξτε τη θήκη που περιέχει τον αποστειρωμένο στειλεό κρατώντας τον από το πλαστικό χερούλι.

Βήμα 3.

Υγράνετε τον στειλεό βυθίζοντάς τον ελαφρά μέσα στο υγρό. Αφαιρέστε περισσεύματα του υγρού πιέζοντας τον στειλεό στην εσωτερική επιφάνεια του σωληναρίου. Κλείστε το καπάκι του φιαλιδίου.

Βήμα 4.

Χρησιμοποιήστε τον στειλεό για να σαρώσετε 25 cm^2 ($5 \times 5 \text{ cm}$) από την υπό εξέταση επιφάνεια ασκώντας μια ελαφριά πίεση και μετακινώντας τον σε δύο κατευθύνσεις κάθετες ή μια στην άλλη, αποφεύγοντας το στέγνωμα της κεφαλής.

Βήμα 5.

Ανοίξτε το φιαλίδιο μεταφοράς προσεκτικά και τοποθετήστε τον βαμβακοφόρο στειλεό στο εσωτερικό του, σιγουρεύοντας την επαφή της μπατονέτας με το υγρό που περιέχεται στο εσωτερικό του.

Βήμα 6.

Σπάστε τον στειλεό στο κατάλληλο μήκος έτσι ώστε να χωρέσει στο φιαλίδιο. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε ένα καθαρό ψαλίδι. Κλείστε καλά το καπάκι και ελέγχτε για τυχόν διαρροές.

Βήμα 7.

Αναγράψτε στην ετικέτα το σημείο δειγματοληψίας και επικοινωνήστε την στο φιαλίδιο. Τοποθετήστε το φιαλίδιο μέσα στο αρχικό σακουλάκι και σφραγίστε το. Επαναλάβετε την διαδικασία για τις υπόλοιπες δειγματοληψίες.

Βήμα 8.

Τοποθετήστε τα προ εξέταση δείγματα στο σακουλάκι μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων και σφραγίστε το. Τοποθετήστε το συμπληρωμένο έντυπο παραγγελίας στην ειδική θήκη εξωτερικά.

Βήμα 9.

Τοποθετήστε το σακουλάκι στο φάκελο αποστολής και στείλτε το στα εργαστήρια της DNAlogy εντός 24 ωρών.